


벤트 설정이 안될 경우 해결 방법(시그니아)

벤트 설정 활성화 시키는 방법

✓ 벤트의 크기에 따라 피팅값이 달라지므로 실제 보청기와 동일하게 벤트를 설정하길 권장드립니다

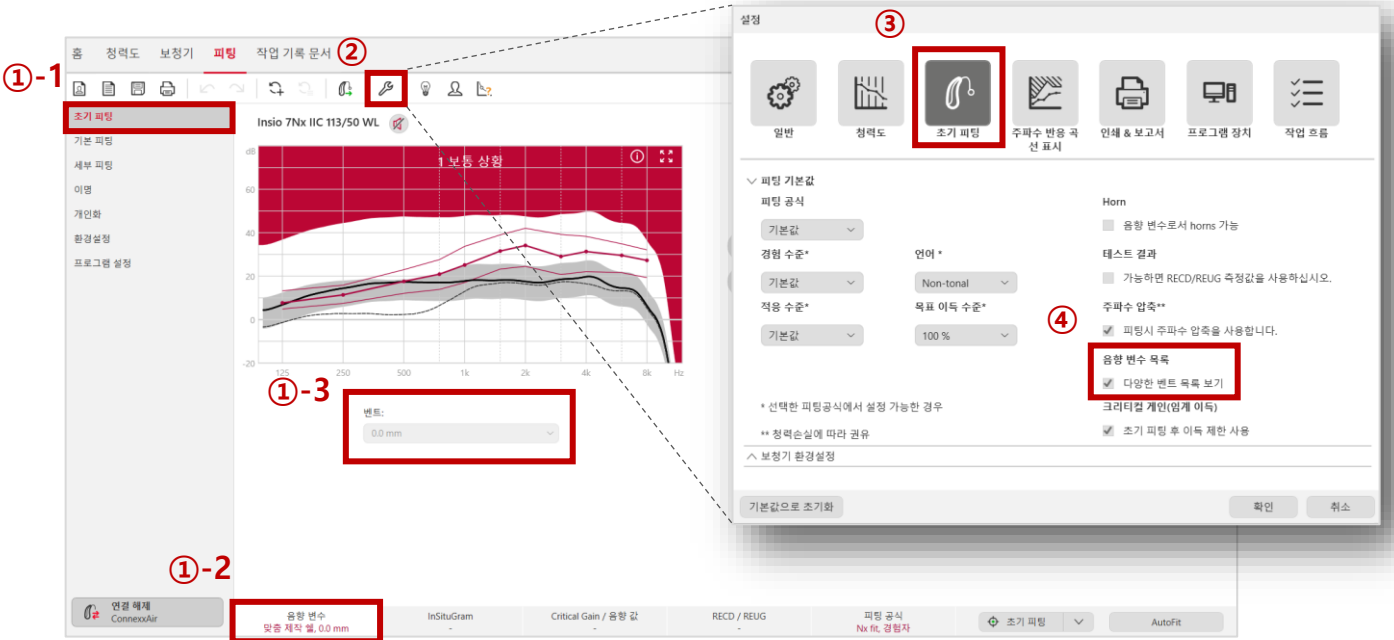


Step. 1 [초기 피팅]-[음향 변수]의 화면에서 [벤트]를 선택할 수 없다면 비활성화 상태(회색 음영)입니다.

Step. 2 [🔧]을 선택하면 [설정] 화면이 나타납니다.

Step. 3 설정 화면에서 [초기 피팅]을 선택하면 초기 피팅 설정 관련 화면이 나타납니다.

Step. 4 [음향 변수 목록]-[다양한 벤트 목록 보기]를 체크한 후 [확인]을 눌러 설정을 완료합니다.

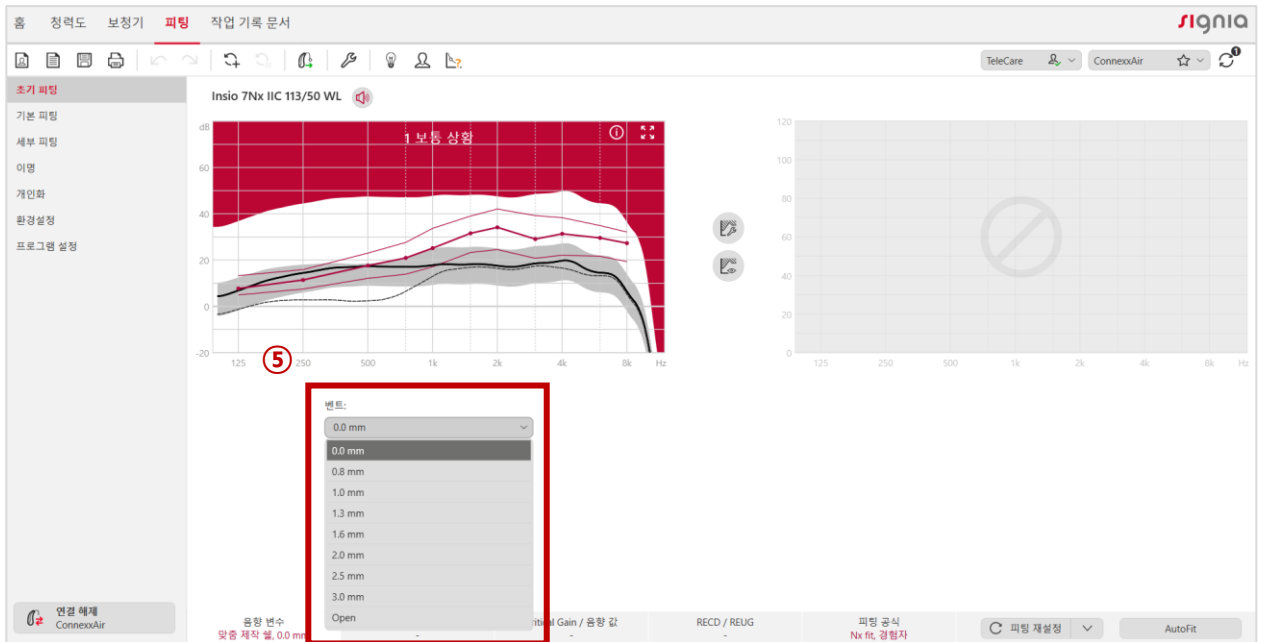

Step. 5 [초기 피팅]-[음향변수]의 화면에서 [벤트] 목록의 활성화를 확인 후 사용합니다.