

4 사운드 보라 사용하기



전원 켜기

사운드 보라에 연결된 전원선을 콘센트에 연결하면 전원이 켜집니다.

전원 끄기

- 1) 전원선을 콘센트에서 빼면 사운드 보라의 전원이 꺼집니다.
- 2) 전환 스위치를 ○ 쪽으로 돌려 놓으면 사운드 보라의 전원은 켜져 있지만 소리가 들리지 않습니다.



보청기 소리를 들어보라



사운드 보라 사용 안내 퀵가이드

사운드 보라 세팅 준비하기

1. 세팅에 필요한 면적
 - 1.5~2평 정도의 공간 필요
 - 최대 4명이 동시에 청취 체험을 할 수 있는 충분한 공간 필요
 - 앉아서 체험할 경우 2평 이상
2. 라운드 테이블 권장 (공간 효율적)



1 보청기 준비하기

세팅이 다른 한 쌍의 보청기



전용 리시버로 교체하기




2 보청기 피팅하기

예시 (상담 대기실 세팅 기준)


- 60dB HL Flat (전 주파수 동일 역치로 설정)
- 제조사 핏 : Nx fit / X fit
- 경험자 설정

3 사운드 보라에 보청기 장착하기

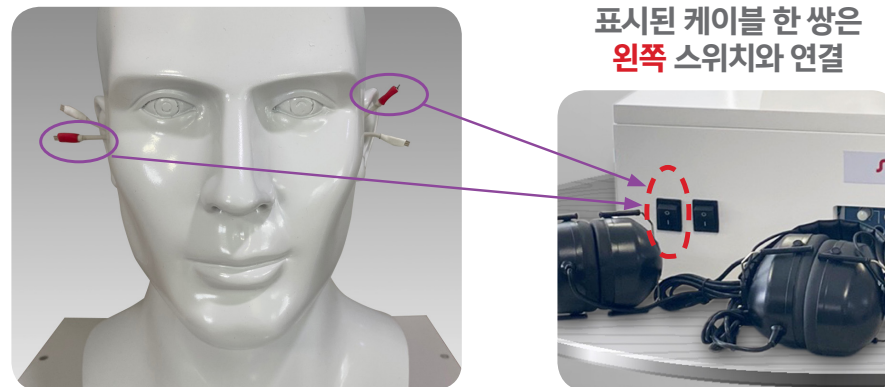

사운드 보라 귀에 나온 케이블에 연결

- 스티커로 표시된 케이블이 한 쌍
- 금속 단자를 꽂아 연결

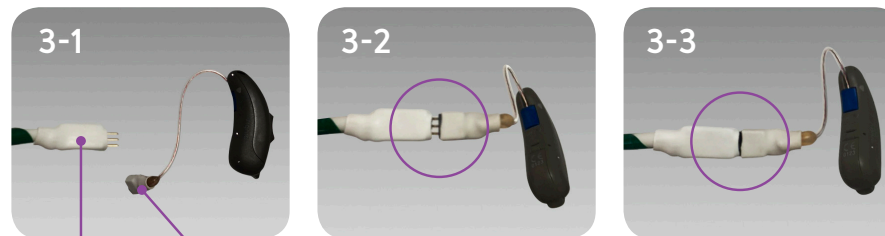

3-1
사운드 보라 귀에 연결된 케이블 보청기에 연결된 전용 리시버

3-2
잘 맞물리도록 구멍에 맞추어 끼웁니다.

3-3
케이블의 금속 핀이 보이지 않을 때까지 끼워 넣습니다.