

하이프로(Hi-Pro)와 XTM RIC P8과 XTM P P8

✓ 다른 프로그래머(ConnexxAir)와 호환이 가능합니다

하이프로(Hi-Pro)와 XTM RIC P8(오픈형)과 XTM P P8(귀걸이형) 연결하는 방법

① 연결 장치




CS 44 케이블



배터리 필

② 연결하는 방법

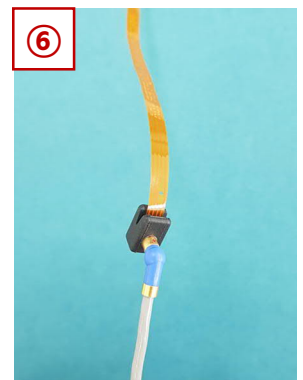

Step. 1 연결해야 할 보청기의 배터리 도어를 열어줍니다.

Step. 2 배터리 도어 안쪽의 깊게 파여진 홈부분을 확인합니다.

Step. 3 배터리 필(동그란 모양)의 돌출된 금속부분을 배터리 도어 홈부분에 맞게 삽입합니다.

Step. 4 배터리 필의 돌출된 부분과 배터리 도어 홈부분을 맞게 삽입하였는지 확인합니다.

Step. 5 배터리 필을 삽입한 상태에서 배터리 도어를 닫습니다.

Step. 6 배터리 필의 어답터 단자(네모난 모양)와 CS44 케이블을 결합하면 연결이 완료됩니다.

✓ 연결 프로그래머 및 케이블 구매 관련 문의는 영업팀(010-8639-9199, 송재규 차장)으로 문의바랍니다.
✓ 보조기기(A&M)는 전용 피팅프로그램이 필요하며, 웹하드에서 다운로드 가능합니다(본사 문의).