


하이프로(Hi-Pro)와 XTM P P6 연결하기

✓ 다른 프로그래머와 호환되지 않습니다

하이프로(Hi-Pro)와 XTM P P6 연결하는 방법

① 연결 장치



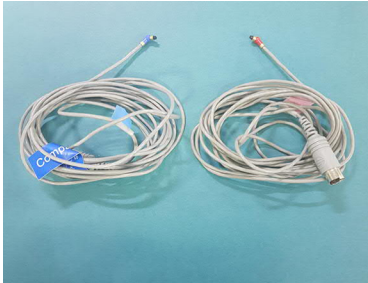


CS 44 케이블



핀(커터 칼 대체 가능)

② 연결하는 방법

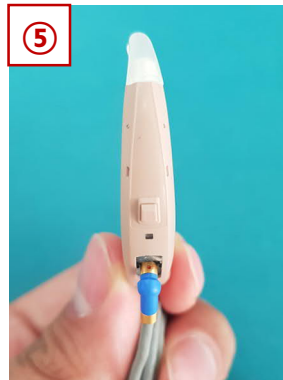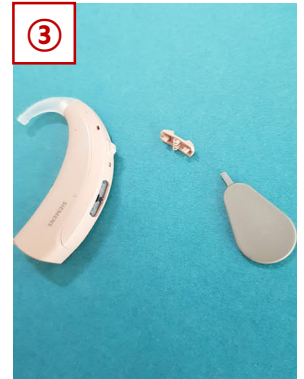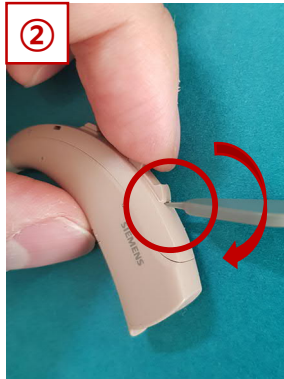

Step. 1 로커 스위치의 상단 버튼을 눌러주면 하단 부분의 틈새로 홈부분을 확인할 수 있습니다.

Step. 2 하단의 틈새에 핀을 꽂고, 병따개 따듯이 로커 스위치를 들어 올립니다.

Step. 3 로커 스위치를 보청기에서 분리합니다.

Step. 4 로커 스위치가 제거된 위치에 단자 연결 부분을 확인합니다.

Step. 5 단자 연결 부분에 직접 CS44 케이블을 결합하면 연결이 완료됩니다.

✓ 연결 프로그래머 및 케이블 구매 관련 문의는 영업팀(010-8639-9199, 송재규 차장)으로 문의바랍니다.
✓ 보조기기(A&M)는 전용 피팅프로그램이 필요하며, 웹하드에서 다운로드 가능합니다(본사 문의).