

# 하이프로(Hi-Pro)와 귓속형 보청기 연결하기


✓ 일부 제품(ITC 이상 + 무선 옵션)은 다른 프로그래머(ConnexxAir)와 호환이 가능합니다

## 하이프로(Hi-Pro)와 귓속형 보청기 연결하는 방법

### ① 연결 장치






CS 44 케이블

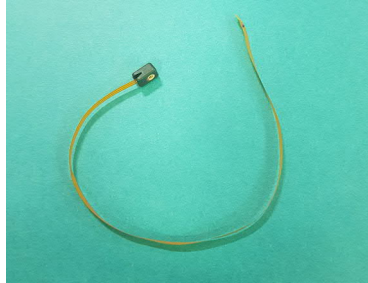

플렉스 커넥터

### ② 연결하는 방법

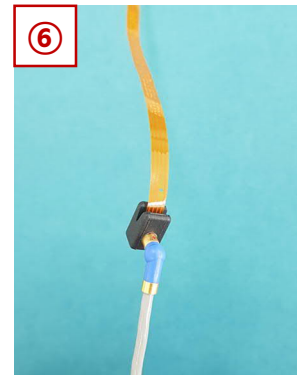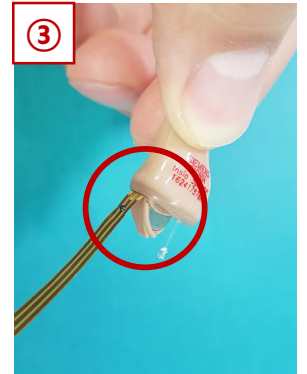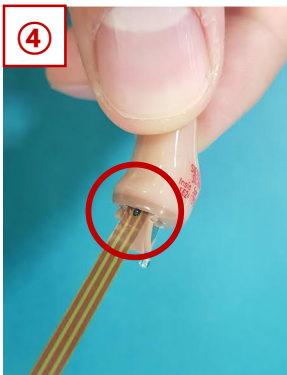

Step. 1 귓속형 보청기의 배터리 도어를 열어줍니다.

Step. 2 해당 제품에 알맞는 배터리(10, 312 배터리)를 착용 시킵니다.

Step. 3 배터리 도어를 절반 정도 닫고, 배터리 도어가 열리는 틈새로 플렉스 커넥터(평평한 부분)를 삽입합니다.  
(플렉스 커넥터의 돌출된 부분을 바깥쪽으로 위치시켜 삽입)

Step. 4 삽입한 플렉스 커넥터의 돌출된 검정색 부분을 끝까지 삽입합니다.

Step. 5 플렉스 커넥터를 삽입한 상태에서 배터리 도어를 닫습니다.

Step. 6 배터리 필의 어답터 단자(네모난 모양)와 CS44 케이블을 결합하면 연결이 완료됩니다.

✓ 연결 프로그래머 및 케이블 구매 관련 문의는 영업팀(010-8639-9199, 송재규 차장)으로 문의바랍니다.  
✓ 보조기기(A&M)는 전용 피팅프로그램이 필요하며, 웹하드에서 다운로드 가능합니다(본사 문의).