

스타일레토 커넥트 LED 표시

- ✓ 스타일레토 커넥트 LED의 경우 충전기 외부(1개), 내부(2개) 위치합니다.
- ✓ 전면 버튼을 짧게 누르면 LED가 표시 됩니다.

스타일레토 커넥트 상황별 LED 표시


유지

깜빡

유지

깜빡

LED 색, 불빛 유지 및 점등의 4가지 형태를 조합하여 충전기와 보청기의 상태를 확인

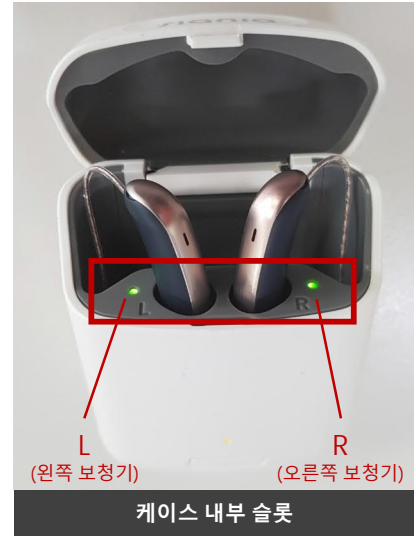

	외부 케이스	케이스 내부 슬롯
충전기 - 전원케이블 연결된 상태	<div style="text-align: center;">● 유지</div> <p>충전기: 100%</p>	<div style="text-align: center;">● 유지</div> <p>보청기: 100%</p>
	<div style="text-align: center;">● 깜빡</div> <p>충전기: 충전중</p>	<div style="text-align: center;">● 깜빡</div> <p>보청기: 충전중</p>
충전기 - 전원케이블 분리된 상태	<div style="text-align: center;">● 유지</div> <p>충전기: 충분 용량 보청기: 완충</p>	<div style="text-align: center;">● 유지</div> <p>보청기: 100%</p>
	<div style="text-align: center;">● 유지</div> <p>충전기: 불충분 용량 보청기: 완충 미지수</p>	<div style="text-align: center;">● 깜빡</div> <p>보청기: 충전중</p>
	<div style="text-align: center;">● 깜빡</div> <p>충전기: 용량 없음 보청기: 충전 불가</p>	