

스타일레토 LED 표시

- ✓ 스타일레토 LED의 경우 충전기 외부에만 위치합니다.
- ✓ 충전기 - 전원 케이블이 분리된 상태일때 전면 버튼을 짧게 누르면 LED가 표시 됩니다.

스타일레토 상황별 LED 표시



	보청기 넣었을 때	보청기 뺐을 때
충전기 - 전원케이블 연결된 상태	<p>유지 [] 유지</p> <p>보청기: 100%</p>	<p>[] 유지 []</p> <p>충전기: 100%</p>
	<p>깜빡 [] 깜빡</p> <p>보청기: 충전중</p>	<p>[] 깜빡 []</p> <p>충전기: 충전중</p>
충전기 - 전원케이블 분리된 상태	<p>유지 깜빡 유지</p> <p>충전기: 완충 수준 보청기: 100%</p>	<p>[] 깜빡 []</p> <p>충전기: 충분 용량</p>
	<p>깜빡 깜빡 깜빡</p> <p>충전기: 완충 수준 보청기: 충전중</p>	<p>[] 깜빡 []</p> <p>충전기: 불충분 용량 혹은 충전 필요</p>