

signia



Audiology Newsletter

# 오디오로지 뉴스레터

Signia KR Audiology & Training | 2021-04-12

안녕하세요 원장님,

시그니아는 청각학적 지식과 보청기 기술 트렌드를 포함한 정보를 공유해드리고자 매월 1회 뉴스레터를 발행합니다.

다양하고 유익한 콘텐츠를 제공드리고자 하며 관심있게 읽어보시고 보청기 시장과 보청기 기술 및 기능에 대한 긍정적인 인사이트를 얻으시는데 도움이 되길 바랍니다.

## 시그니아 커넥스 9.5.1 Update

### What`s New?

#### 시그니아 커넥스 9.5.1 Update 내용

시그니아 커넥스 9.5.0버전에서 9.5.1 버전으로 업데이트가 되었습니다. 업데이트 된 몇 가지 내용에 대해서 간단하게 내용을 전달드리고자 합니다.

첫째, 커넥스와 윈도우 언어의 호환성 문제를 해결했습니다(일부 국가 해당).

둘째, Xperience 제품(T-Coil 옵션 없는 제품)에서 FOG(Full on Gain) 활성화 후 소리가 나지 않는 문제를 해결하였습니다.

셋째, 노아(Noah)에서 커넥스를 시작했을 경우,  
새로운 청력도나 실이측정(REM) 데이터가  
그 이전 마지막 세션으로 저장되는 문제가 발생했었고  
해당 버그가 해결되었습니다.

간단히 정리하자면, 다음 3가지의 문제가 해결되었습니다.

- 언어 호환성 문제
- FOG 활성화 후 소리가 나지 않는 문제
- 노아(Noah)로 시작할 때 청력도, 실이측정(REM)이 저장되지 않는 문제

마지막으로 보청기 펌웨어 업데이트는 9.5.0버전과 동일하며  
만약 이전에 진행하지 않으셨다면 **반드시 보청기 펌웨어 업데이트를 진행**해주세요!

---

## 3월 e트레이닝 요약

### 소규모 그룹 트레이닝

지난 3월 전문점 소규모 그룹 트레이닝이 드디어 완료되었습니다.

필수 주제 2개(시그니아 어시스턴트, 본인 목소리 처리 기술)와  
가장 많이 선택된 선택 주제 2개로 하루에 총 4개의 주제가 교육됐습니다.  
다른 주제도 관심 가져주셨지만 제한된 시간으로 많은 분들이 아쉬워하셨는데요,  
그래서 따로 편하신 시간에 들으실 수 있도록 e캠퍼스로 초대합니다!

#### ◆ 교육 주제 ◆

1. 시그니아 어시스턴트
2. 본인 목소리 처리 기술(OVP)
3. 피팅 절차(기본)
4. 폐쇄효과 관리
5. 피드백 관리
6. 약세사리 사용 방법

해당 내용을 다시 한번 살펴보고 싶으시거나 부득이하게 교육에 참석하지 못한  
원장님들을 위해 교육 자료 및 교육 녹화 동영상을 공유드릴 예정입니다.

**2021년 소규모 그룹 트레이닝 다시 보기 신청을 받습니다!**

아래의 'e캠퍼스 신청하기'를 클릭 후 작성해 주시면 **4월 12일 오후부터**  
**활성화**됩니다.

신청기한은 **4월 9일 6시**까지입니다.

아래 링크 버튼을 클릭클릭! 해주세요.

[e캠퍼스 신청하기 >](#)

[교육 자료 다시보기 >](#)

[교육 동영상 다시보기 >](#)

교육 영상은 '시그니아 이캠퍼스(Signia eCampus)'를 통해 다시 보기가 가능합니다.

## 저널 및 해외 보고자료 요약



### Covid-19 이후 보청기 요구 증가 추세 보고

Covid-19로 인한 정부의 사회적 거리두기, 5인 이상 모임 금지 등의 정책으로 많은 분들께서 많이 힘든 시기를 보내고 계셨는데요, 원장님들께서 보신다면 기뻐하실 해외 저널을 소개해드리려 합니다.

Covid-19로 보청기 수요가 일시적으로 줄었지만 점차 늘어날 것이라는 연구인데요, 국내도 동일한 패턴을 따라갈 것으로 예상되며 수요가 증가될 것을 대비하고, 적절한 전략을 구사한다면 재작년과 같이 회복될 것이라 생각합니다.

또, 추가적으로 원장님들께서 적절하게 난청자들을 선별하고  
고객이 전문적인 케어를 받는다고 느끼실 수 있도록  
**‘난청 증상 체크리스트’**를 전달드립니다.  
따로 활용하실 수 있도록 마지막 장에 따로 제작해두었습니다.

[저널\\_한글 요약본 보기 >](#)

# signia

서울시 용산구 원효로 90길 11 용산 더프라임 업무동 22층

대한민국

<https://www.signia-pro.co.kr>

수신 거부

개인 정보 변경

이메일 정책

본사가 제작, 배포하는 저작물 원본 이외에 내용 및 문구, 첨부파일 등을 무단으로 수정, 변형, 삭제하여 발생하는 문제에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.

© 2021, WS Audiology A/S