


시그니아 어시스턴트 사용하기(센터용)

✓ 초기 피팅 후 사용 가능

I. 시그니아 어시스턴트 사용 활성화

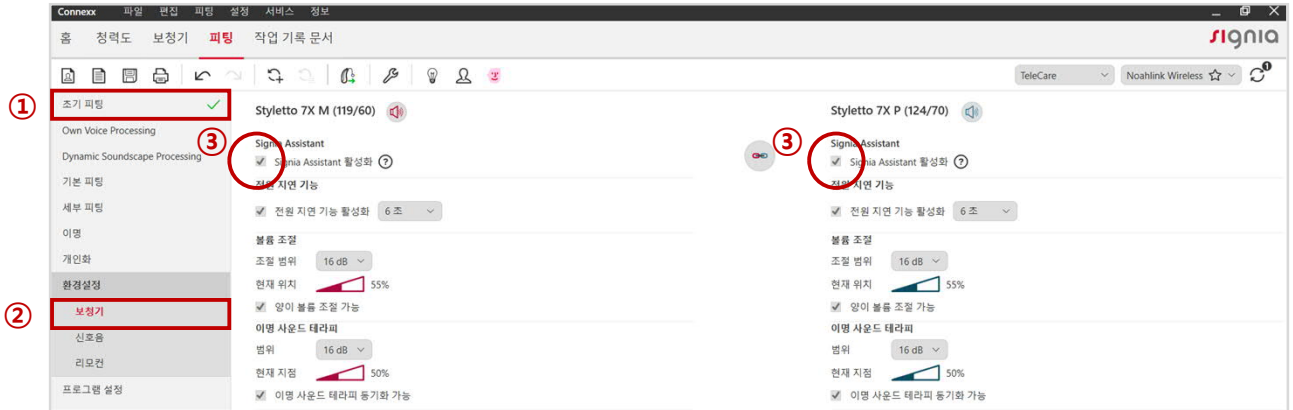


Step. 1 [초기 피팅]을 실시합니다.

Step. 2 [환경설정] - [보청기] 메뉴를 선택합니다.

Step. 3 [Signia Assistant 활성화]를 체크표시하여 활성화 시켜주고 저장합니다.

II. 시그니아 어시스턴트 내용 확인 및 버리기

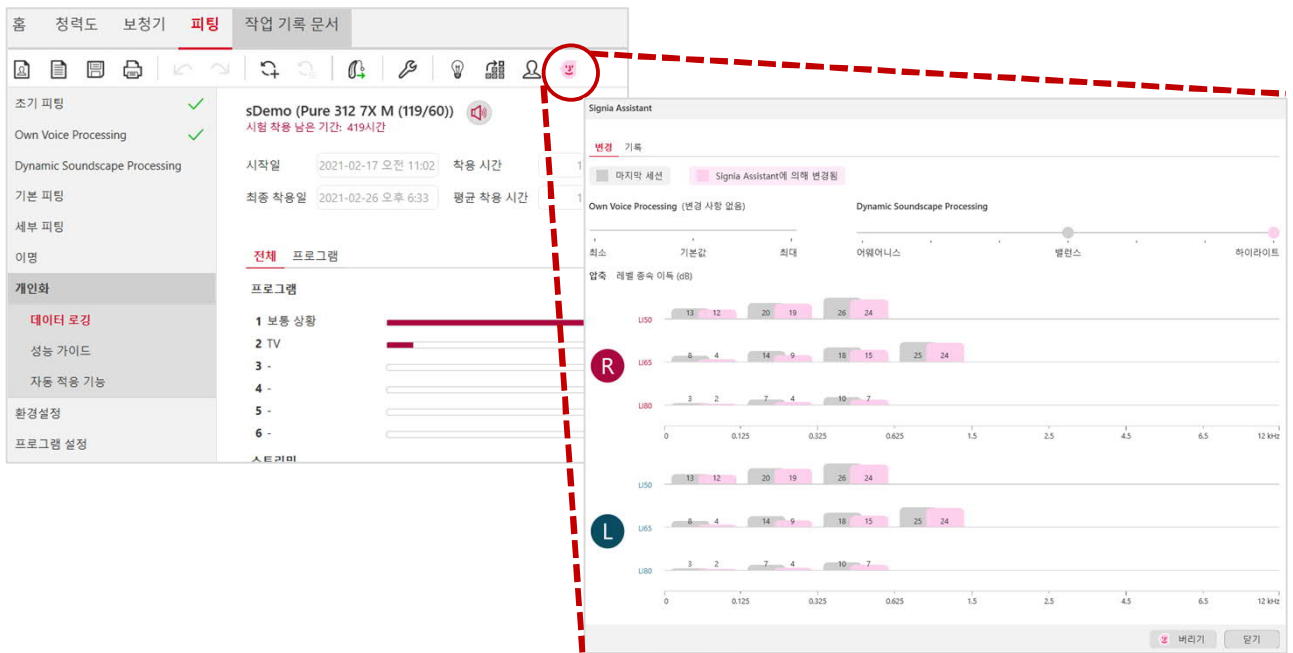

- 시그니아 어시스턴트 아이콘을 클릭하면 마지막 피팅 내용과 고객이 직접 조절한 값을 확인할 수 있습니다.
 - 회색 - 마지막 피팅 값
 - 분홍색 - 고객이 시그니아 어시스턴트를 사용하여 조절한 값
- 시그니아 어시스턴트 값을 분석하여 불편했던 내용을 확인할 수 있으며, 잘못된 경우 '버리기' 가능합니다.

✓ 시그니아 Xperience에서만 사용 가능(Pure C&G X, Pure 312 X, Styletto X)
 ✓ 피팅 프로그램 9.3 이상, 앱 v2.2 이상에서 사용가능