


A&M 보조기기 전용 프로그램 피팅 리포트 출력

보조기기 제품

CIC	ITC	RIC	BTE
XTM P8 CIC	XTM P8 ITC	XTM RIC P8	XTM P P8
XTM P6 a CIC	XTM P6 a ITC		XTM P P6

출력 방법


- ① A&M 피팅프로그램(보조기기 전용 프로그램)을 선택합니다
- ② 해당고객의 데이터를 수정합니다

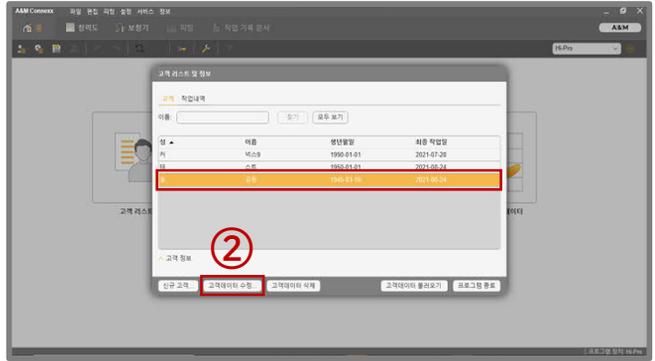

- ③ 고객 상세정보를 기입합니다
- ④ 상단에 있는 [작업 기록 문서]를 선택합니다



- ⑤ 좌측에 있는 [작업 기록 문서(현재 CXX에번역되어 있...)]를 선택합니다

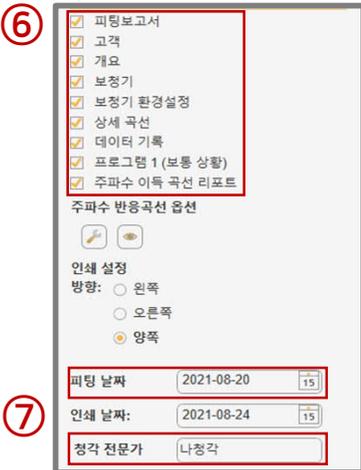

- ⑥ 출력하고자 하는 내용을 선택합니다
- ⑦ 청각 전문가를 반드시 기입합니다
- ⑧ 해당 고객의 정보를 다시 한 번 확인합니다
- ⑨ 인쇄 후 출력합니다

* 지역공단마다 요청항목이 상이할 수 있습니다

A&M 보조기기 전용 프로그램 피팅 리포트 출력

필수 입력 사항

1	고객 성명	신청하는 고객정보 및 제품 정보가 동일해야 합니다
2	생년월일	
3	모델명	
4	시리얼 번호	
5	피팅일자	실제로 피팅을 진행한 날짜가 되어야 하며, 피팅일자가 출력일자보다 이전이어야 합니다
6	청각전문가	청각전문가의 이름이 기재되어야 합니다 (출력물에 표시되게 하려면 설명 참조)

→ 필수 입력 사항을 반드시 기입하여 피팅 리포트를 출력합니다

피팅리포트 미리 보기

이 화면은 A&M 피팅 리포트의 첫 번째 페이지를 보여줍니다. 상단에는 A&M 로고와 고객 정보(이름, 생년월일, 모델명, 시리얼 번호)가 표시되어 있습니다. 중앙에는 두 개의 그래프가 포함되어 있으며, 각각 '실용성'과 '편의성'을 나타냅니다. 하단에는 제품 사양과 관련된 상세 정보가 나열되어 있습니다.

이 화면은 A&M 피팅 리포트의 두 번째 페이지를 보여줍니다. 상단에는 A&M 로고와 고객 정보(이름, 생년월일, 모델명, 시리얼 번호)가 표시되어 있습니다. 중앙에는 두 개의 그래프가 포함되어 있으며, 각각 '실용성'과 '편의성'을 나타냅니다. 하단에는 제품 사양과 관련된 상세 정보가 나열되어 있습니다.

이 화면은 A&M 피팅 리포트의 세 번째 페이지를 보여줍니다. 상단에는 A&M 로고와 고객 정보(이름, 생년월일, 모델명, 시리얼 번호)가 표시되어 있습니다. 중앙에는 두 개의 그래프가 포함되어 있으며, 각각 '실용성'과 '편의성'을 나타냅니다. 하단에는 제품 사양과 관련된 상세 정보가 나열되어 있습니다.