

인시오 px(귓속형 보청기) 연결하기


✓ 하이프로(Hi-Pro) 이외에 커넥스 에어(Connexx Air)와 연결이 가능합니다(단, 무선옵션 필요)

인시오 px 연결하는 방법

① 연결 장치






CS 44 케이블

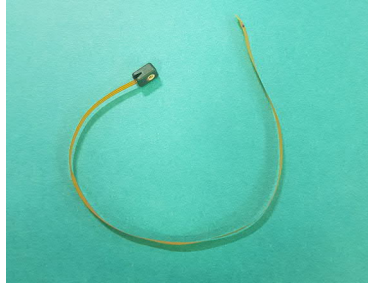

플렉스 커넥터

② 연결하는 방법

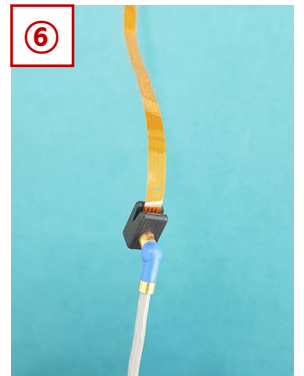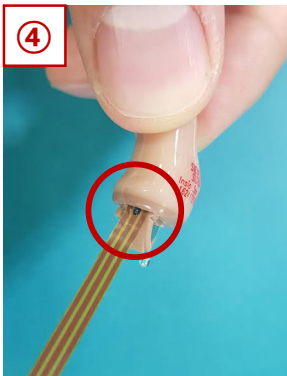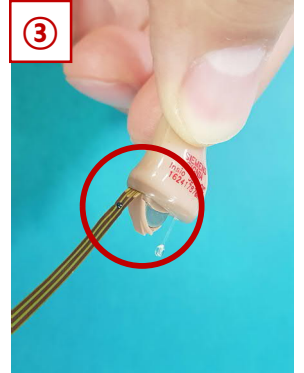

Step. 1 귓속형 보청기의 배터리 도어를 열어줍니다.

Step. 2 해당 제품에 알맞는 배터리(IC, CIC: 10 / ITC: 312 배터리)를 착용 시킵니다.

Step. 3 배터리 도어를 절반 정도 닫고, 배터리 도어가 열리는 틈새로 플렉스 커넥터(평평한 부분)를 삽입합니다.
(플렉스 커넥터의 돌출된 부분을 바깥쪽으로 위치시켜 삽입합니다)

Step. 4 삽입한 플렉스 커넥터에서 돌출된 검정색 부분을 끝까지 삽입합니다.

Step. 5 플렉스 커넥터를 삽입한 상태에서 배터리 도어를 닫습니다.

Step. 6 배터리 필의 어답터 단자(네모난 모양)와 CS44 케이블을 결합하면 연결이 완료됩니다.

