

스트림라인 TV (StreamLine TV) 상태표시

LED 상태표시



전원 TV



전원 불빛 하얀색
스트림라인 TV의 전원이 켜지고 있는 상태



모든 표시등 파란색 30초간 지속
보청기와 스트림라인 TV 연결 완료 상태



모든 표시등 초록색
스트림라인 TV 가 RCA를 통해 오디오 신호를 받고 있는 상태

오류상태

광케이블 연결시,

RCA 연결시,



모든 표시등 파란색 깜박거림
전원 켜진 상태 + 보청기와 스트림라인 TV 연결 진행 상태 → 보청기 껐다 켜 후 연결 재시도



전원 표시등 초록색 + TV 표시등 파란색
① 음향신호가 존재하지 않은 상태
(재생이 정지되었거나 음소거 상태)
② 보청기가 작동 가능 범위 밖에 있는 상태
→ 가까이 위치 시킵니다
③ 다른 보청기와 연결되어 있는 상태
→ 연결 재시도



전원 표시등 빨간색
① 음향신호가 존재하지 않은 상태
(재생이 정지되었거나 음소거 상태)
② 광케이블 손상



모든 표시등 빨간색 깜박거림
오류 → 청각전문가 문의

모든 표시등 초록색 *초록색 표시등임에도 소리가 나지 않은 경우

- ① 보청기가 작동 가능 범위 밖에 있는 상태
→ 가까이 위치 시킵니다
- ② 다른 보청기와 연결되어 있는 상태
→ 연결 재시도

전원 표시등 초록색 + TV 표시등 초록색 깜박거림
① 스트림라인 TV 가 오디오 신호를 받지 않는 상태
② 볼륨 크기가 너무 작은 상태

전원 표시등 초록색 + TV 표시등 빨간색 깜박거림
RCA → 광케이블로 연결 재시도

전원 표시등 빨간색
① 전자 기기의 볼륨이 충분히 크지 않는 상태
② 음향신호가 존재하지 않은 상태
(재생이 정지되었거나 음소거 상태)