


# Charge & Go 충전기 I

## 사용 가능한 보청기


Xperience	Nx
퓨어 C&G X (1X, 2X)	퓨어 C&G Nx
모션 C&G X (1X, 2X)	모션 C&G Nx

## 사전 준비 사항

C&G 충전기 I 에 케이블을 연결시킵니다

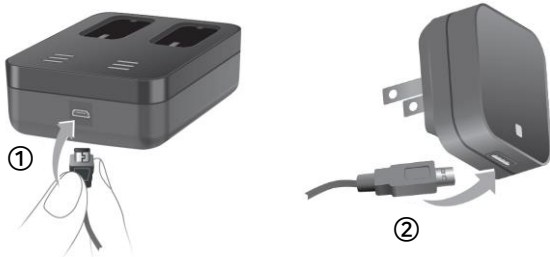

- ① USB 전원 공급 단자와 USB 전원 케이블을 연결시킵니다
- ② 전원 플러그와 USB 전원 케이블을 연결시킵니다

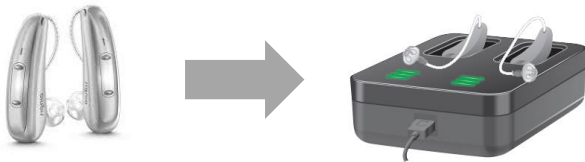

보청기를 사진과 같이 C&G 충전기 I 에 올려놓습니다  
보청기의 전원은 자동으로 꺼지고 충전이 시작됩니다

## LED 상태표시

- LED 불빛 없음  
충전기에 전원 케이블이 연결되어 있지 않거나 전원공급이 되고 있지 않는 상태
- 초록색 LED 불빛 1개  
충전기에 전원 케이블이 연결된 상태 + 보청기는 충전 슬롯에 올려져 있지 않거나 올바르게 올려지지 않은 상태
- 초록색 LED 불빛 깜박거림  
충전 시작 전에 보청기의 충전 상태 확인 중
- 주황색 LED 불빛 1개  
충전 상태 0 ~ 33%
- 주황색 LED 불빛 2개  
충전 상태 34 ~ 66%
- 주황색 LED 불빛 3개  
충전 상태 67 ~ 99%
- 초록색 LED 불빛 3개  
보청기 충전 완료
- 주황색 LED 불빛 3개가 깜박거림  
냉각 상태로 충전은 30분 후에 다시 시작
- 빨간색 LED가 불빛이 깜박거리거나 유지  
오류 있음(청각 전문가 문의)

## 충전기 분리

보청기를 충전기에서 꺼내면 자동으로 보청기 전원이 켜집니다

## 충전시간

완전충전 : 3~4시간 → 최대 23~24시간 사용 가능  
급속충전 : 30분 → 6~7시간 사용 가능

\* 보청기 배터리 잔량이 20%미만일 경우 자동으로 30분간 급속충전 모드로 충전되며, 그 이후로는 일반충전모드로 변경됩니다

※ 호환되지 않은 제품을 사용하면 기기 오작동의 위험이 있습니다