

보청기 작업 기록 입히는 방법

- 먼저 해당 고객의 리스트를 실행합니다(미리 연결할 필요 없음)


작업 내역 불러오는 방법



- ① [파일] - [작업 내역 리스트]를 선택합니다
- ② 원하는 날짜의 작업 내역을 선택합니다
- ③ [작업내역 불러오기] 선택합니다

: 해당 과녁을 선택해야 작업내역 불러오기 가능

보청기에 작업 내역 입히는 방법

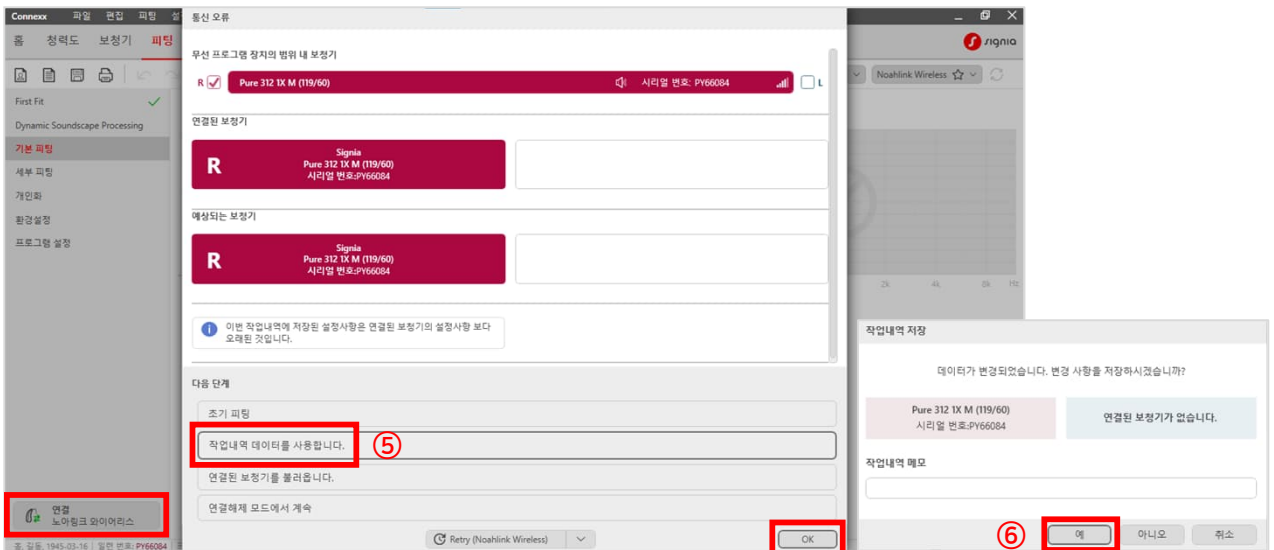

- ④ 보청기를 연결합니다
- ⑤ [작업내역 데이터를 사용합니다] - [OK]를 선택합니다
- ⑥ 저장합니다