


# 바람소리 제거 기능 활성화하는 방법

## 바람소리 기능표


Xperience	7	5	3	2	1
e 윈드 스크린	●	●	●	●	

## 바람소리 제거 기능

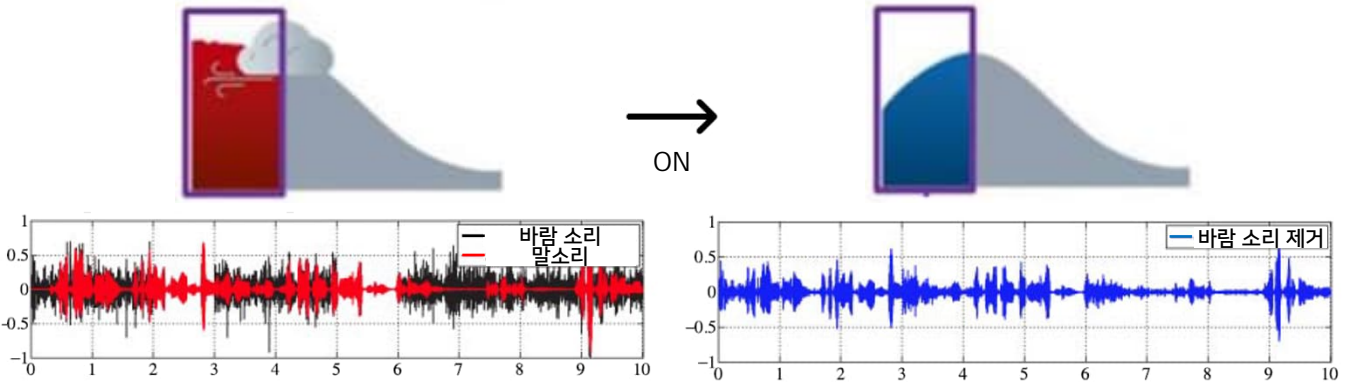

바람 소리로 발생하는 소음을 감소시키고 편안한 착용감을 제공하는 기능  
 바람소리가 주로 발생하는 주파수 대역인 1.5kHz 이하 영역의 바람 소음을 감소하여 신호음을 개선

## 바람소리 제거 기능 활성화하는 방법

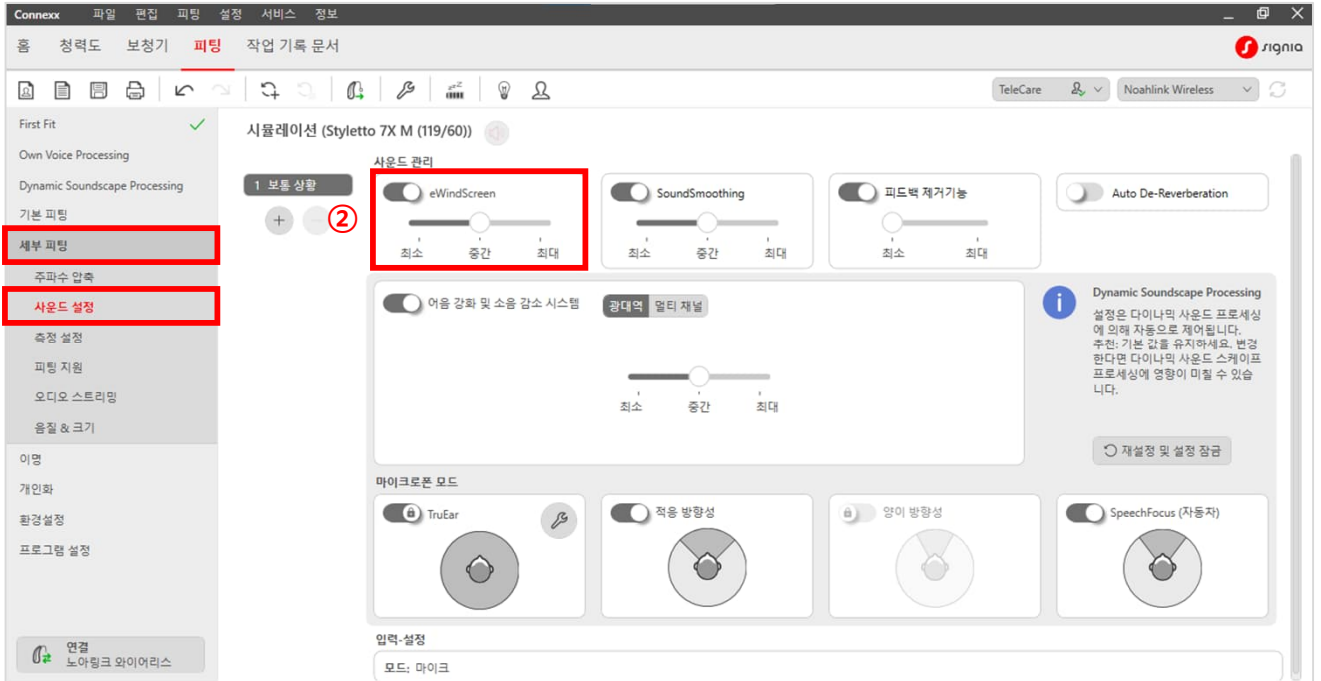

① [세부 피팅] - [사운드 설정]을 선택하면 소리 관리 설정 화면이 나타납니다

② [e윈드 스크린] 체크를 활성화한 뒤 알맞은 강도로 조절합니다

\* 양이착용을 선택할 경우, 양이 e윈드스크린이 활성화됩니다(제품에 따라 기능 적용이 다르므로 '제품 안내서' 참조)